

### AUGENLID-REINIGUNGSSCHAUMZUM ENTFERNEN VON AUGENSEKRETEN

Nur zur äußerlichen Anwendung

#### INDIKATIONEN

Wenn Sie trockene, juckende oder gereizte Augen haben, liegt das Problem möglicherweise nicht an den Augen, sondern den Augenlidern. NAVIBLER® TTO DAILY CARE wurde zur Behandlung gereizter Augenlider entwickelt, die durch Pathologien wie Trockenheit, Allergien, Blepharitis oder Blepharokonjunktivitis aufgrund des Vorhandenseins von Demodex (Augenlidmilben) und/oder bakteriellem Befall betroffen sind. Die Wirkung von NAVIBLER® TTO DAILY CARE wird durch die mechanische Entfernung von überschüssigem Talg, Pollen und anderen Verunreinigungen von den Augenlidern erzielt. Bei anhaltenden Sekreten und Rückständen wird eine tägliche Anwendung empfohlen. Dieser Schaum kann auch verwendet werden, um den Ansatz der Wimpern und die Ränder des Augenlids vor und nach einer Operation zu reinigen. NAVIBLER® TTO DAILY CARE wird zur Erhaltungspflege bei Patienten empfohlen, die die Blepharitis-Behandlung mit NAVIBLER® TTO INTENSIVE CARE durchgeführt haben.

#### BESCHREIBUNG

NAVIBLER® TTO DAILY CARE enthält Teebaumöl, das dank seiner öligen Textur dazu beiträgt, die Sekrete von Augenlidern und Wimpern zu beseitigen. NAVIBLER® TTO DAILY CARE enthält Allantoin, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

#### WAS IST BLEPHARITIS?

Blepharitis ist eine chronische Entzündung der Augenlider und eine der häufigsten Erkrankungen des Auges, die in der Regel durch das Vorhandensein von Demodex und bakteriellem Befall hervorgerufen wird. Dies ist oft die Hauptursache für Augenbeschwerden, Rötung und tränende Augen. Weitere Augensymptome einer Blepharitis sind Brennen, Jucken, Lichtempfindlichkeit, Reizung, sandiges und grießiges Gefühl im Auge, insbesondere beim Aufwachen. Blepharitis ist eine chronische Erkrankung, für die es keine Heilung gibt und die eine langfristige Behandlung, Hygiene und Erhaltungspflege erfordert, um sie unter Kontrolle zu halten und damit verbundenen Komplikationen, die mit dieser Art von Beschwerden einhergehen, vorzubeugen.

#### WAS IST EIN TROCKENES AUGE?

Ein trockenes Auge ist eine Störung des Tränenflusses aufgrund einer mangelnden Produktion von Tränenflüssigkeit oder der übermäßigen Verdampfung der Tränenflüssigkeit, die Schäden an der Hornhaut und Augenoberfläche verursachen kann.

#### BEI AUGENOPERATIONEN

Vor oder nach einer Augenoperation besteht ein Infektionsrisiko durch das Vorhandensein von Bakterien auf den Augenlidern und Wimpern, daher ist es wichtig, die Empfehlungen Ihres Augenspezialisten bezüglich der Hygiene und Pflege zu befolgen.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:



1 Waschen Sie sich vor dem Auftragen des Schaums die Hände und reinigen Sie anschließend die Fingerspitzen mit NAVIBLER® TTO DAILY CARE



2 Schütteln Sie die Flasche vor der Anwendung, um den Schaum zu erzeugen. Drücken Sie den Pumpspender und tragen Sie den Schaum auf die sauberen Fingerspitzen auf. Bei Verwendung vor oder nach einer Operation oder bei empfindlichen Augen wird empfohlen, den Schaum auf sterile Gaze zu geben.



3 Schließen Sie das Auge und massieren Sie das Augenlid und die Wimpern mit NAVIBLER® TTO DAILY CARE. Berühren Sie während der Anwendung nicht die Augen und öffnen Sie diese nicht. Lassen Sie den Schaum vor dem Öffnen Ihres Auges trocknen, damit das Produkt nicht in das Auge gelangt. Lassen Sie das Produkt mindestens 3 bis 5 Minuten einwirken.



4 Spülen Sie nach jeder Anwendung die Wimpern und Augenlider mit warmem Wasser ab. Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang beim anderen Auge. Für maximale Wirksamkeit wiederholen Sie diese Behandlung 2-3 Mal täglich über einen Zeitraum von 7 bis 14 Tagen.

#### EIGENSCHAFTEN

NAVIBLER® TTO DAILY CARE ist eine nicht fettende und nicht reizende Formulierung zur topischen Anwendung.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor und nach dem Gebrauch immer die Hände waschen. • Vor dem Auftragen des Schaums Kontaktlinsen entfernen. Vor dem erneuten Einsetzen der Kontaktlinsen darauf achten, dass alle Schaumreste und Rückstände entfernt sind. • **Halten Sie die Augen geschlossen und lassen Sie den Schaum trocknen, bevor Sie die Augen öffnen.** • Das Produkt ist für die Anwendung auf Augenlidern und Wimpern bestimmt. **Nicht direkt auf die Augen auftragen.** • **Nur zur äußerlichen Anwendung.** • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden. Bei Kindern ab 6 Jahren darf die Anwendung nur von einem Erwachsenen und erst nach Rücksprache mit Ihrem Facharzt durchgeführt werden. • Im Falle der Anwendung bei schwangeren oder stillenden Frauen wird empfohlen, vorher Ihren Facharzt zu konsultieren. • Während des Anwendungszeitraums nur hypoallergenes Augen-Make-up und schonende Hautlotionen im Augenbereich benutzen. • Nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Produkts anwenden. • Wenn eine Reaktion auf das Produkt auftritt, die Anwendung sofort beenden, die Augen mit Wasser spülen und bei anhaltenden Symptomen den Augenarzt kontaktieren. • Entsorgen Sie alle Lösungsreste innerhalb von 3 Monaten nach dem ersten Öffnen. • **Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.** • **Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.**

#### ZUSAMMENSETZUNG

Ätherisches Öl des Melaleucaalternifolia (Teebaum), ätherisches Öl der Anthemis nobilis (Kamille), D-Panthenol, Allantoin, Taurin, Cocamidopropylbetaine, Polysorbat 80, Borsäure, Dinatrium-EDTA, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, Natrium-N-hydroxymethylglycinat und gereinigtes Wasser.

#### DARREICHUNGSFORMEN

NAVIBLER® TTO ist in zwei Formulierungen erhältlich: • NAVIBLER® TTO INTENSIVE CARE zur Beseitigung starker Augensekrete und Verunreinigungen aufgrund von Infektionen durch Bakterien und Demodex (rote Packung); • NAVIBLER® TTO DAILY CARE zur Erhaltungspflege von Augenlidern und Wimpern (blaue Packung).

#### VERPACKUNG

50-ml-Flasche mit einem Pumpspender REF F50NTTD475  
5-ml-Flasche mit einem Pumpspender REF F5NTTD476

#### LAGERUNG:

Zwischen 5° und 35° aufbewahren und vor direkter Lichtquelle schützen.

#### HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER NOVAX PHARMA

Le Coronado, 20, Av. de Fontvieille, MC 98000 MONACO  
www.novaxpharma.com

**VISU**farma  
the eye health company

#### VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.  
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL  
info@visufarma.com



CE 0051