

navibler®

TTO

INTENSIVE CARE



BLEPHARITIS-AUGENLIDSCHAUM ZUR ENTFERNUNG VON SEKRETEN UND VERUNREINIGUNGEN VON AUGENLIDERN UND WIMPERN BEI BAKTERIELLER INFektion ODER DEMODEX-BEFALL

Nur zur äußerlichen Anwendung

INDIKATIONEN

NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE ist zur Behandlung gereizter Augenlider und Wimpern durch die mechanische Entfernung starker Augensekrete angezeigt. Diese werden durch entzündliche Zustände wie Trockenheit, Kontaktlinsen, Allergien, Blepharitis und Blepharokonjunktivitis infolge des Befalls mit Demodex (Augenlidmilben) oder bakterieller Infektionen hervorgerufen. Dieser Schaum kann auch verwendet werden, um den Ansatz der Wimpern und die Ränder des Augenlids vor und nach einer Operation zu reinigen.

BESCHREIBUNG

NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE enthält eine hohe Konzentration Teebaumöl, das dank seiner öligen Textur dazu beiträgt, besonders hartnäckige Sekrete von Augenlidern und Wimpern zu beseitigen. NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE enthält Aloe Vera, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.

WAS IST BLEPHARITIS?

Blepharitis ist eine chronische Entzündung der Augenlider und eine der häufigsten Erkrankungen des Auges, die in der Regel durch das Vorhandensein von Demodex und bakteriellem Befall hervorgerufen wird. Dies ist oft die Hauptursache für Augenbeschwerden, Rötung und tränende Augen. Weitere Augensymptome einer Blepharitis sind Brennen, Jucken, Lichtempfindlichkeit, Reizung, sandiges und grießiges Gefühl im Auge, insbesondere beim Aufwachen. Blepharitis ist eine chronische Erkrankung, für die es keine Heilung gibt und die eine langfristige Behandlung, Hygiene und Erhaltungspflege erfordert, um sie unter Kontrolle zu halten und damit verbundenen Komplikationen, die mit dieser Art von Beschwerden einhergehen, vorzubeugen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:



1 Waschen Sie sich vor dem Auftragen des Schaums die Hände und reinigen Sie anschließend die Fingerspitzen mit NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE.



2 Schütteln Sie die Flasche vor der Anwendung, um den Schaum zu erzeugen. Drücken Sie den Pumpspender und tragen Sie den Schaum auf die sauberen Fingerspitzen auf. Bei Verwendung vor oder nach einer Operation oder bei empfindlichen Augen wird empfohlen, den Schaum auf sterile Gaze zu geben.



3 Schließen Sie das Auge und massieren Sie das Augenlid und die Wimpern mit NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE. Berühren Sie während der Anwendung nicht die Augen und öffnen Sie diese nicht. Lassen Sie den Schaum vor dem Öffnen Ihres Auges trocknen, damit das Produkt nicht in das Auge gelangt. Lassen Sie das Produkt mindestens 3 bis 5 Minuten einwirken.



4 Spülen Sie nach jeder Anwendung die Wimpern und Augenlider mit warmem Wasser ab. Hinweis: Wiederholen Sie den Vorgang beim anderen Auge. Für maximale Wirksamkeit wiederholen Sie diese Behandlung 2-3 Mal täglich über einen Zeitraum von 7 bis 14 Tagen.

EIGENSCHAFTEN

NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE ist eine nicht fettende und nicht reizende Formulierung zur topischen Anwendung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor und nach dem Gebrauch immer die Hände waschen. • Vor dem Auftragen des Schaums Kontaktlinsen entfernen. Vor dem erneuten Einsetzen der Kontaktlinsen darauf achten, dass alle Schaumreste und Rückstände entfernt sind. • **Halten Sie die Augen geschlossen und lassen Sie den Schaum trocknen, bevor Sie die Augen öffnen.** • Das Produkt ist für die Anwendung auf Augenlidern und Wimpern bestimmt. **Nicht direkt auf die Augen auftragen.** • **Nur zur äußerlichen Anwendung.** • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden. Bei Kindern ab 6 Jahren darf die Anwendung nur von einem Erwachsenen und erst nach Rücksprache mit Ihrem Facharzt durchgeführt werden. • Im Falle der Anwendung bei schwangeren oder stillenden Frauen wird empfohlen, vorher Ihren Facharzt zu konsultieren. • Während des Anwendungszeitraums nur hypoallergenes Augen-Make-up und schonende Hautlotionen im Augenbereich benutzen. • Nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Produkts anwenden. • Wenn eine Reaktion auf das Produkt auftritt, die Anwendung sofort beenden, die Augen mit Wasser spülen und bei anhaltenden Symptomen den Augenarzt kontaktieren. • Entsorgen Sie alle Lösungsreste innerhalb von 3 Monaten nach dem ersten Öffnen. • Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist. • **Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.**

ZUSAMMENSETZUNG

Ätherisches Öl des Melaleuca alternifolia (Teebaum), ätherisches Öl der Anthemis nobilis (Kamille), D-Panthenol, Aloe Vera, Taurin, Kamillenaroma, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan, Borsäure, Dinatrium-EDTA, Natrium-N-hydroxymethylglycinat, Cocamidopropyl-Betaine, PEG-40 hydriertes Rizinusöl, PPG-26 Buteth-26, Trideceth-9 und gereinigtes Wasser.

DARREICHUNGSFORMEN

NAVIBLEF® TTO ist in zwei Formulierungen erhältlich: • NAVIBLEF® TTO INTENSIVE CARE zur Beseitigung starker Augensekrete und Verunreinigungen aufgrund von Infektionen durch Bakterien und Demodex (rote Packung); • NAVIBLEF® TTO DAILY CARE zur Erhaltungspflege von Augenlidern und Wimpern (blaue Packung).

VERPACKUNG

50-ml-Flasche mit einem Pumpspender REF F50NTT1477
5-ml-Flasche mit einem Pumpspender REF F5NT11478

LAGERUNG:

Zwischen 5 ° und 35 ° aufbewahren und vor direkter Lichtquelle schützen.

HERSTELLER UND PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

NOVAX PHARMA

Le Coronado, 20, Av. de Fontvieille, MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL
info@visufarma.com

VISUfarma
the eye health company

