



AUGENLIDTÜCHER. AUGENLID-, WIMPERN- UND GESICHTSREINIGER.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

ZUSAMMENSETZUNG

Terpinen-4-ol, Natriumhyaluronat, Aloe vera und gereinigtes Wasser.

BESCHREIBUNG

Demodex-Milben (*Demodex folliculorum* und *Demodex brevis*) sind die häufigsten Ektoparasiten, die die Talgdrüsenfollikel der Haut befallen. Die Demodex-Prävalenz nimmt mit dem Alter zu. Der unkontrollierte Demodex-Befall der Haut (Demodikose) wurde mit mehreren Erkrankungen der Haut in Verbindung gebracht, einschließlich Rosacea, mit papulopustulären Hautläsionen und perifollikulärem entzündlichem Infiltrat. Oftmals kann sich eine Demodikose nach Auftreten im Gesicht ausbreiten und in den Augenlidern und Wimpern entfalten.

ANWENDUNGSGEBIETE

NAVIBLEF® WIPES werden für die Entfernung von Augensekreten und Rückständen auf Augenlidern und Wimpern empfohlen, die durch allergische und entzündliche Erkrankungen verursacht werden, die mit Demodex, Blepharitis, Blepharokonjunktivitis, Meibom-Drüsen-Dysfunktion (MDD), Rosacea, Brennen, Juckreiz, Reizung, Rötung, Schwellung und anderen Erkrankungen des Augenlidrands in Zusammenhang stehen. Es kann auch im Anschluß an eine Katarakt-Chirurgie verwendet werden. Beim starkem Auftreten von Sekreten und Rückständen wird eine tägliche Anwendung empfohlen.

VERPACKUNG

Schachtel mit 20 sterilen Augenlidtücher - **REF** W20NW223

GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHLIESSEN SIE WÄHREND DER ANWENDUNG IHRE AUGEN UND LASSEN SIE DIE LÖSUNG EINTROCKNEN, BEVOR SIE DIE AUGEN WIEDER ÖFFNEN (1 Minute).

- Waschen, spülen und trocknen Sie Hände und Gesicht.
- Reißen Sie den Aluminiumbeutel auf, entfernen und entfalten Sie dann das Augenlidtuch.
- Schließen Sie die Augen fest und wischen Sie die Lider etwa 30 Sekunden lang sanft mit einer Bewegung von Seite zu Seite ab oder tupfen Sie das Augenlidtuch auf den betroffenen Bereich. Das Wachstum der Krankheitserreger wird durch die Lösung in den Tüchern, nicht durch das Reiben gehemmt. Das Reiben kann in einzelnen Fällen zu Unbehagen führen.
- Halten Sie die Augen 1 Minute lang geschlossen, damit die behandelte Fläche trocknen kann.
- Für optimale Ergebnisse waschen Sie die getrocknete Lösung nicht sofort ab, sondern lassen Sie sie einwirken, indem Sie 5 bis 10 Minuten warten, bevor Sie mit fließendem Wasser nachspülen.
- Wenden Sie das Augenlidtuch, sobald die Reinigung des ersten Augenlids beendet ist, und verwenden Sie die gegenüberliegende Seite, um den Vorgang bei Ihrem anderen Augenlid zu wiederholen. Falls von Ihrem Augenarzt nicht anders verordnet, können Sie ein Tuch für beide Augenlider verwenden.
- Entsorgen Sie das Tuch nach dem Gebrauch.

Empfohlene Anwendung der NAVIBLEF® WIPES entsprechend des Schweregrad des Befalls.

Symptom	Häufigkeit	Dauer
Leicht - Mäßig	1 - 2 mal täglich	6 - 10 Wochen
Mäßig - Schwer	2 - 3 mal täglich	10 - 12 Wochen

Art der Anwendung der NAVIBLEF® WIPES

Raumtemperatur für die tägliche Reinigung von Gesicht, Wimpern und Augenlidern.

Wärme für eine gründliche Reinigung in Fällen von Bindehautentzündung, Blepharokonjunktivitis, Gerstenkorn oder Okklusion des Tränenkanals. Tauchen Sie die Packung für 3 bis 5 Minuten in lauwarmes Wasser ein. Entnehmen Sie das Tuch, halten Sie es gefaltet und massieren Sie sanft das Augenlid und die Wimpern.

Kälte für eine abschwellende Wirkung bei Vereiterung oder Entzündung der Augenlider. Geben Sie den ungeöffneten Beutel für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank, entnehmen Sie das Tuch und halten Sie es für einige Minuten auf den betroffenen Bereich.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Waschen Sie vor und nach der Verwendung immer Ihre Hände.
- Kontaktlinsen vor der Anwendung entfernen.
- Halten Sie die Augen während der Anwendung geschlossen.
- Das Produkt ist für die Anwendung auf Gesicht, Augenlidern und Wimpern bestimmt.
- Nicht in der Sichtweite und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht bei Kindern unter 3 Jahren verwenden.
- Nicht im Falle einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe verwenden.
- Bei einigen Patienten kann ein leicht stechendes Gefühl auftreten, was normal ist und innerhalb weniger Minuten verschwinden sollte; falls dies nicht der Fall ist, mit fließendem Wasser oder einer Kochsalzlösung spülen.
- Bei Reizung sofort die Verwendung beenden. Spülen Sie die Augen mit Wasser und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt, wenn die Reizung andauert.
- Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Nicht wiederverwenden (Risiko der Kontamination und verminderter Wirksamkeit).
- Die Tücher sollen nach Verwendung im Hausmüll entsorgt werden.

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht direkt in die Augen geben.

AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Platz zwischen 5 und 25°C.

Die Augenlidtücher können Farbveränderungen aufweisen, ohne die Qualität des Produktes zu beeinträchtigen.

Vertrieb für Deutschland:

VISUfarma B.V.

Amstelplein 1

1096 HA, Amsterdam - NIEDERLANDE

PROTECTED BY INTERNATIONAL PATENT
APPLICATION N°: WO/2018/229084

NOVAX® PHARMA

Le Coronado

20, Av. de Fontvieille

MC 98000 MONACO

www.novaxpharma.com



0051

VISUfarma

STERILE R



V3 - Rev. 13/11/2017