

# Xailin®

HA 0,2%  
Plus

## BEFEUCHTENDE AUGENTROPFEN MIT NATRIUMHYALURONAT 0,2%, LÖSUNG

### ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat 0,2%, Glycerin, Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, hochgereinigtes Wasser.

### BESCHREIBUNG

Xailin® HA 0,2% Plus sind durch biotechnologische Synthese gewonnene befeuchtende Augentropfen mit 0,2% Natriumhyaluronat-Lösung. Natriumhyaluronat verbessert aufgrund seiner spezifischen physikalischen, viskoelastischen Eigenschaften und der Fähigkeit, an der Hornhaut zu haften, die Stabilität des Tränenfilms und stellt den Sehkomfort wieder her.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Befeuchtung und Linderung von Symptomen in Verbindung mit dem Syndrom des Trockenen Auges sowie von Reizungen, Rötung und Ermüddungserscheinungen der Augen, die durch längere Arbeit am Computer und die Einwirkung von Umweltfaktoren, wie z. B. Wind, Sonne, trockene Luft, Salzwasser, Rauch, Staub, Klimaanlage, Heizung verursacht werden. Beugt Augenreizungen vor, die durch das Tragen von Kontaktlinsen verursacht werden.

### FÜR WEN SIND XAILIN® HA 0,2% PLUS AUGENTROPFEN BESTIMMT?

Xailin® HA 0,2% Plus Augentropfen sind für Kinder im Alter ab einem Monat und Erwachsene geeignet.

### WIE OFT SOLLTEN SIE XAILIN® HA 0,2% PLUS AUGENTROPFEN ANWENDEN?

Bei Bedarf einen Tropfen in den Bindehautsack geben. Xailin® HA 0,2% Plus Augentropfen können täglich angewendet werden, auch von Trägern aller Arten von Kontaktlinsen, da sie keine Konservierungsmittel enthalten. Sie werden in der Regel 3- bis 4-mal täglich angewendet, wobei ein Tropfen in den Bindehautsack jedes Auges gegeben wird. Bei Bedarf können Sie die Tropfen auch öfter anwenden.

### WIE SIND XAILIN® HA 0,2% PLUS AUGENTROPFEN ANZUWENDEN?

Xailin® HA 0,2% Plus Augentropfen sollten nur äußerlich am Bindehautsack angewendet werden.

1. Waschen Sie sich vor der Anwendung des Produktes gründlich die Hände.
2. Entfernen Sie die Kappe und beginnen Sie mit der Anwendung. Berühren Sie mit der Tropferspitze nicht die Oberfläche des Auges.
3. Neigen Sie den Kopf leicht zurück.
4. Halten Sie die Flasche mit der Spitze nach unten (senkrecht).
5. Ziehen Sie das untere Augenlid leicht nach unten und drücken Sie die Flasche, bis ein Tropfen in den Bindehautsack tropft.
6. Schließen Sie die Augenlider und bewegen Sie den Augapfel, um den Tropfen auf der Augenoberfläche zu verteilen.
7. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das andere Auge.
8. Setzen Sie die Schutzkappe nach Gebrauch wieder auf den Tropfer. Achten Sie beim Auftragen darauf, dass Sie die Oberfläche des Auges und des Augenlids nicht mit der Spitze des Tropfers berühren.
9. Spülen Sie nach der Anwendung der Tropfen die Oberfläche des Auges nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit

### WANN SIND XAILIN® HA 0,2% PLUS AUGENTROPFEN NICHT ANZUWENDEN?

- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile.
- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn eine allergische Reaktion auftritt.
- Nicht anwenden bei Entzündung des Auges durch Bakterien, Pilze oder Viren.

### WIE SIND XAILIN® HA 0,2% PLUS AUGENTROPFEN AUFZUBEWAHREN?

- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern.
- Trocken lagern bei einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Sie dürfen dieses Medizinprodukt nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Behandlung für einen Monat nach empfohlener Dosierung. Entsorgen Sie die Flasche 3 Monate nach dem ersten Öffnen.
- Nicht verwendete Lösung muss verworfen werden.

### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
- Berühren Sie mit der Tropferspitze niemals Ihr Auge oder eine andere Oberfläche, um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden.
- Bei Verwendung anderer ophthalmischer Lösungen sollten Sie mindestens 15 Minuten warten, bevor Sie Xailin® HA 0,2% Plus Augentropfen anwenden. Dabei sollte dieses Produkt zuletzt verabreicht werden.
- Das wiederverwendbare Medizinprodukt sollte nur von einem Patienten verwendet werden.

### MELDUNG VON MEDIZINISCHEN EREIGNISSEN ODER NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

### PACKUNG

Flasche mit 10 ml im Umkarton. Medizinprodukt.

### HERSTELLER:

**SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k**

ul. Kielewowska 2, 55-095 Mirków, Polen

**VISU**farma  
the eye health company

### VERTRIEB DURCH

VISUfarma B.V.  
Joop Geesinkweg 601, 1114 AB, NL  
info@visufarma.com

